


传承经典 创领未来




一体化分支支架现已覆盖全球**20+**国家

全新一代输送系统

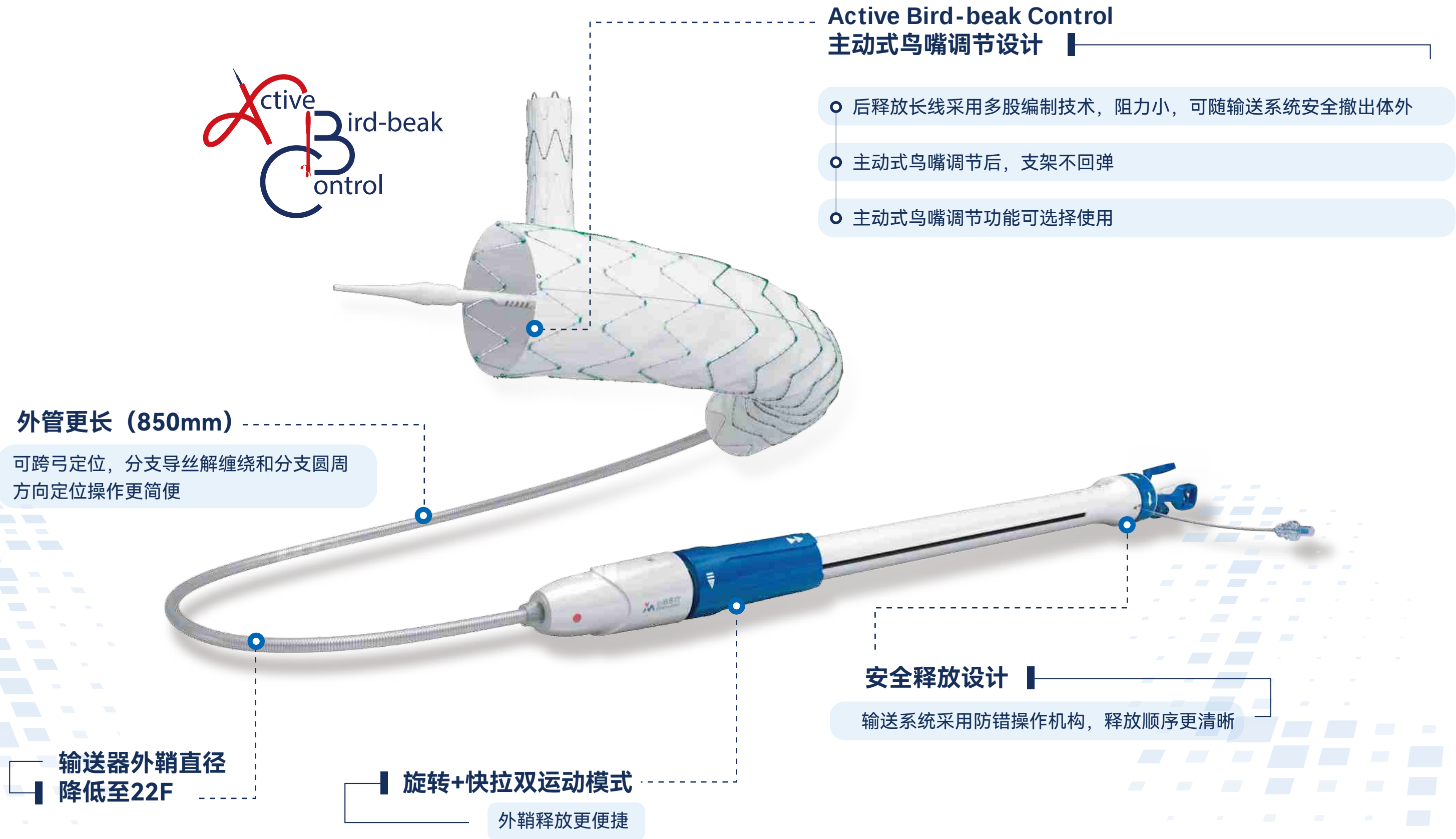


弓部一体，重建分支

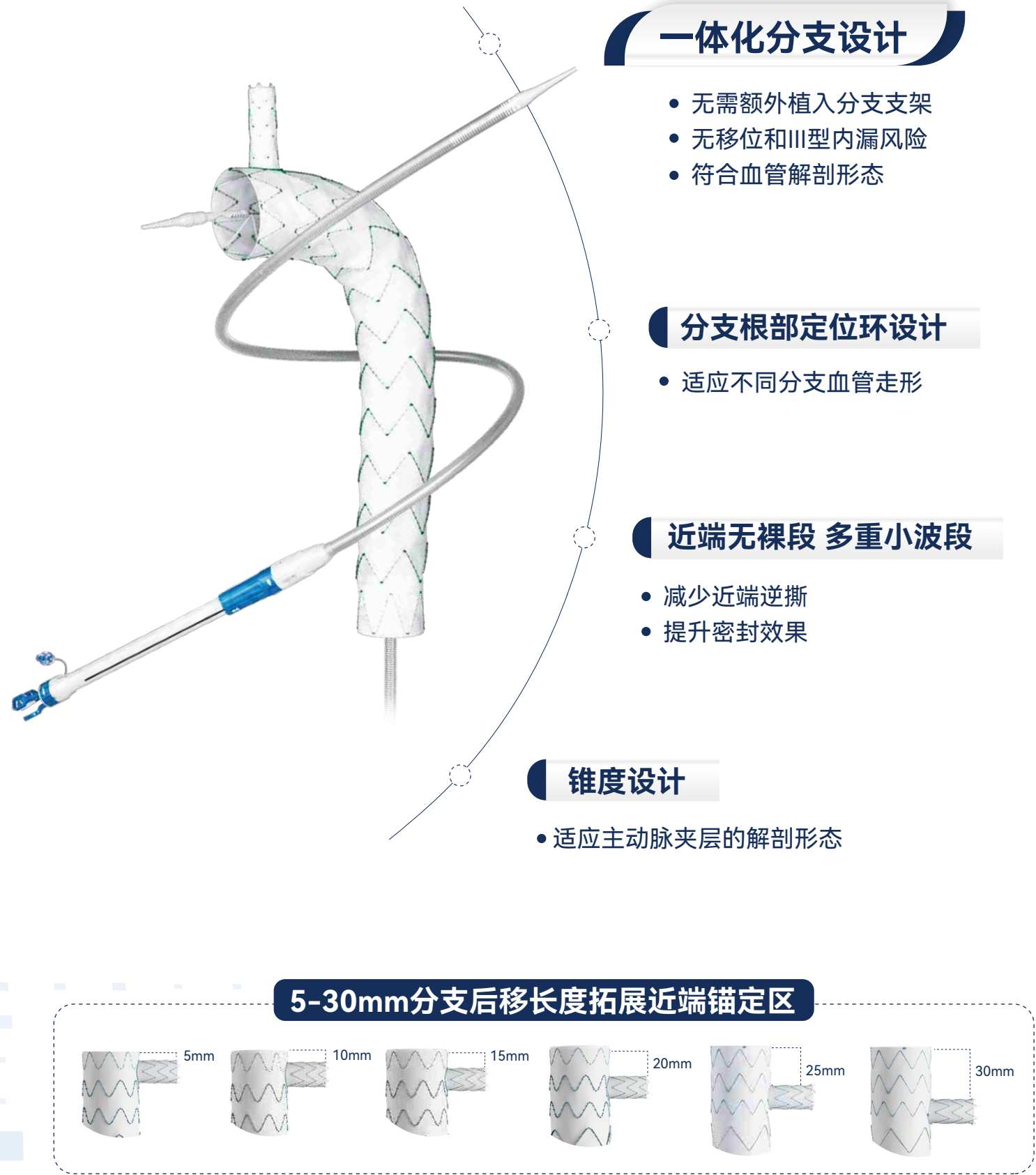

主动式鸟嘴调节(ABC)临床案例

型号规格

主动式鸟嘴调节(ABC)步骤

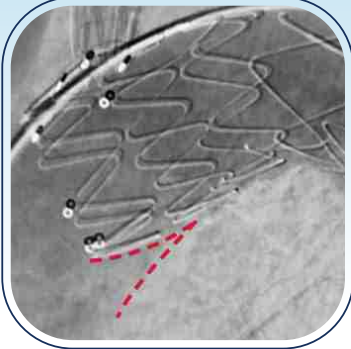


近端调节前






近端调节后



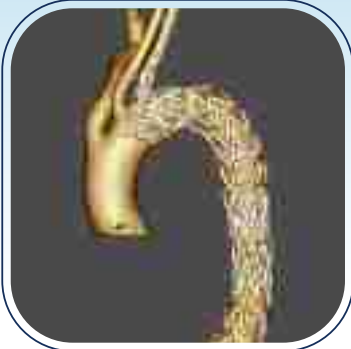

12个月随访



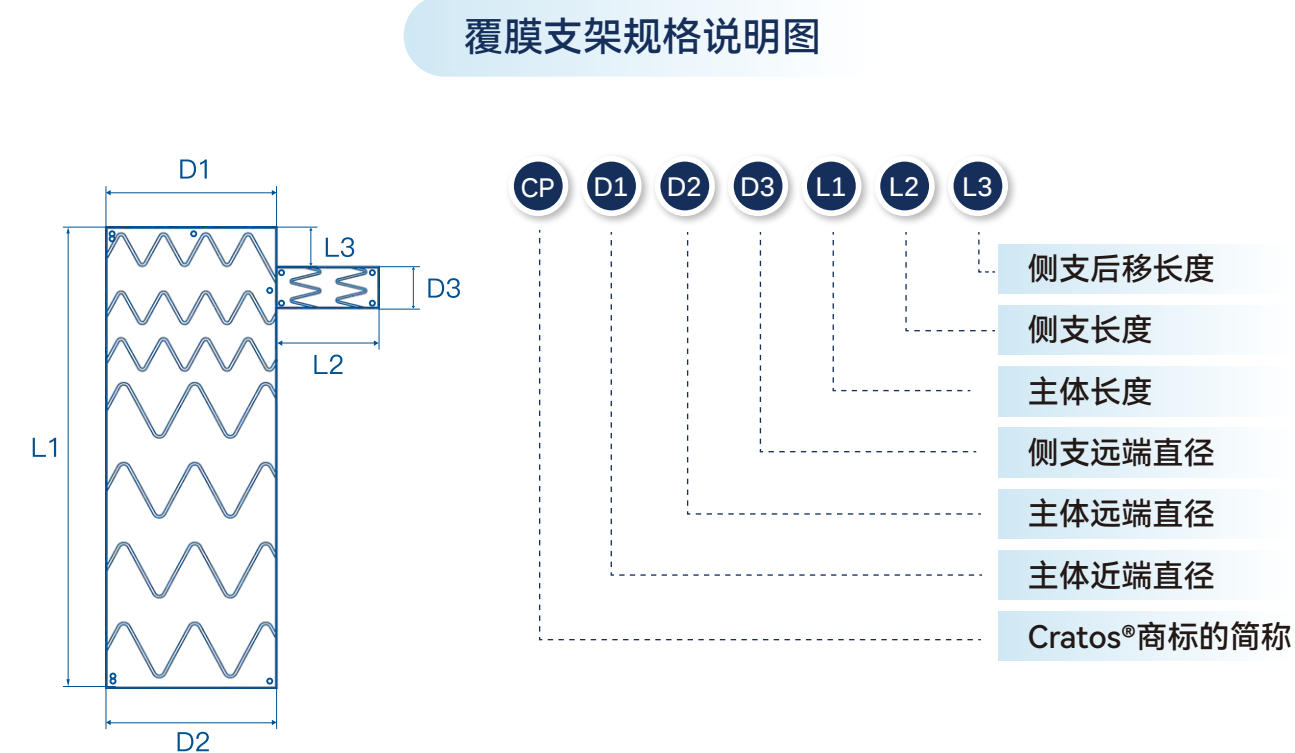

产品规格范围

产品规格	规格范围
主体近端直径D1(mm)	26/28/30/32/34/36/38/40/42/44
主体远端直径D2(mm)	20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44
侧支远端直径D3(mm)	6/8/10/12/14
主体长度L1(mm)	60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/ 140/150/160/170/180/190/200/210
侧支长度L2(mm)	25/30/35/40/45
侧支后移长度L3(mm)	5 /10 /15 /20 /25 /30

支架直径（近端）	输送系统外径
D1≤34mm	22F
D1≥36mm	24F



地址：上海市·浦东新区·康新公路3399弄·1号（上海国际医学园区·医创园）
网址：www.endovastec.com
电话：(86) (21) 38139300 传真：(86) (21) 33750026 邮编：201318




Cratos® 通天镰™
分支型主动脉覆膜支架系统


传承经典
创领未来



- 整体向后移动输送系统
注意：不要固定超硬导丝

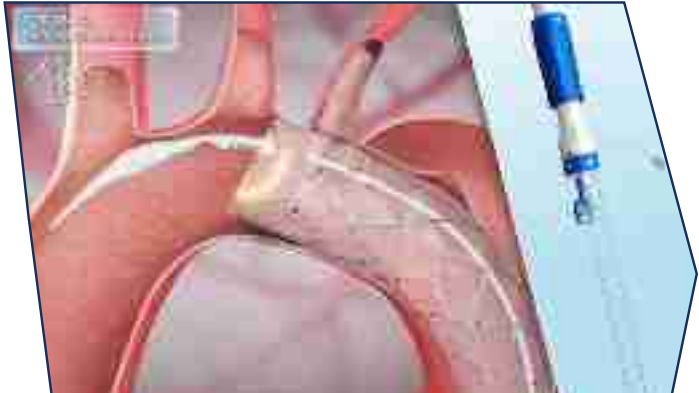

- 观察屏幕，支架调节到位后，
停止后撤输送系统

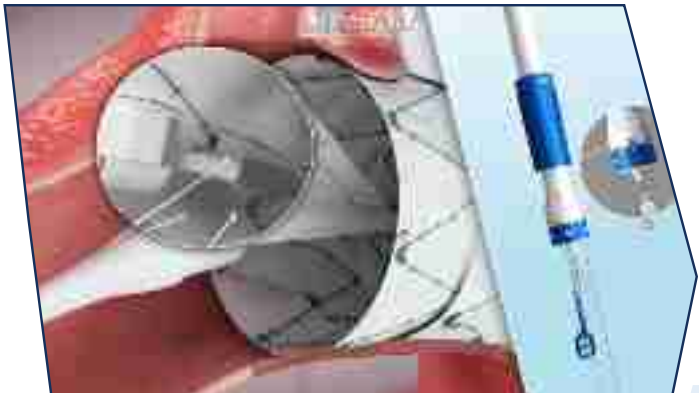

- 旋转控制盘，撤出拉环“3”，
解除支架近端约束